


# BAFÔMETRO DESCARTÁVEL REDLINE

**DESCRIÇÃO GERAL :** O REDLINE utiliza o princípio internacional de testes de ar expirado para indicar um NÍVEL DE ÁLCOOL NO SANGUE. Quando a bolsa é totalmente inflada e o ar esvaziado através do tubo teste, a presença do álcool modifica os cristais amarelos para a cor verde indicando se pode ou não dirigir e o limite entre infração administrativa e criminalização, prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

**CALIBRAGEM:** Conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

**INSTRUÇÕES DE USO :** Faça o teste somente 20 minutos após o seu último drinque. Não fume imediatamente antes de soprar. O fumo afeta a reação.

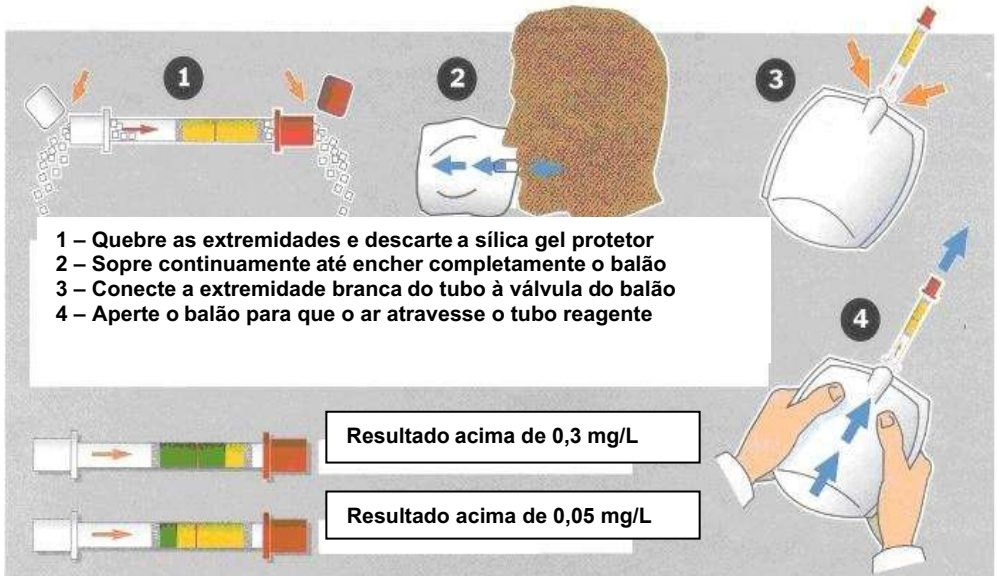

**ATENÇÃO:** Leia atentamente as instruções de uso e siga corretamente as orientações. Manuseie com cuidado e mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de contato acidental com os olhos ou pele enxágue imediatamente com bastante água e procure um médico. Armazene o produto em temperaturas inferiores a 30°C. Evite exposição prolongada à luz direta e ao sol. REDLINE é um produto internacionalmente certificado e confiável para auto uso como elemento de triagem de condutores de veículos e na medicina e segurança do trabalho, não devendo seus resultados se constituir evidência legal conclusiva.

**Importado e distribuído exclusivamente por:**

Orbitae Diagnósticos LTDA. - Av. Prudente de Moraes 840 Sala 601 Bairro Coração de Jesus Belo Horizonte - MG  
CEP - 30380-252 CNPJ - 11.162.384.0001-65 Inscrição Estadual - 00141402840000 Inscrição Municipal -  
02467440014 www.orbitae.com.br orbitae@orbitae.com.br - Tel.: 31-3309-6648